




# PRESERVE O VALOR DA SUA BOMBA INFUSORA


GUIA RÁPIDO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA  
SUA BOMBA INFUSORA

# COMO LIMPAR CORRETAMENTE AS BOMBAS?


EM CASO DE DERRAME ACIDENTAL NA BOMBA IV, PODE COMEÇAR POR

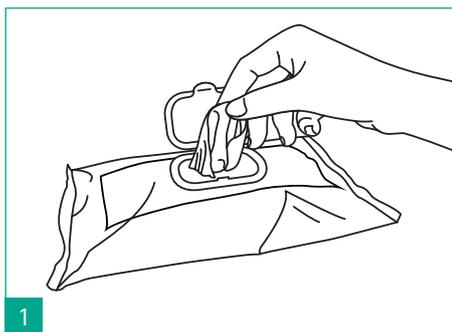

Use Meliseptol® Wipes Sensitive para limpar a bomba.

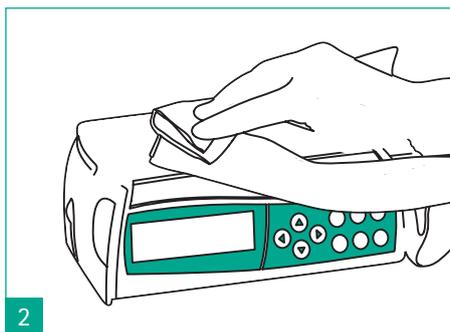


Caso seja necessário limpar o ecrã e as teclas, enquanto as bombas estão a infundir, tome especial atenção para não pressionar ou alterar nenhum parâmetro.

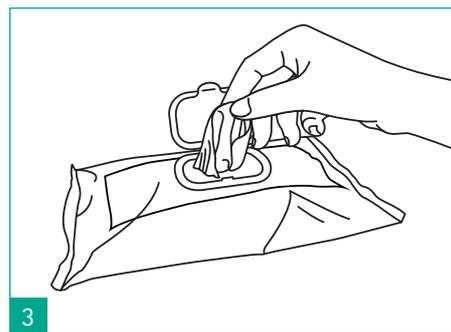


Após limpar o derrame, use outro toalhete Meliseptol® para garantir que a bomba fica completamente limpa.


# COMO DESINFETAR CORRETAMENTE AS BOMBAS?

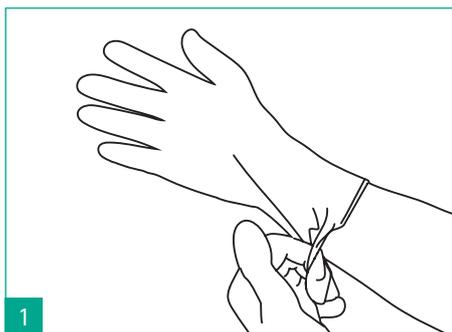


Higienize as mãos com solução alcoólica ou lave com água e sabão. Use luvas.

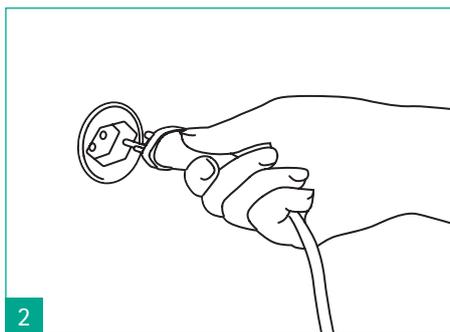

Desligue o equipamento e retire a ficha elétrica. Deixe as áreas quentes da superfície arrefecerem antes da desinfecção.\*

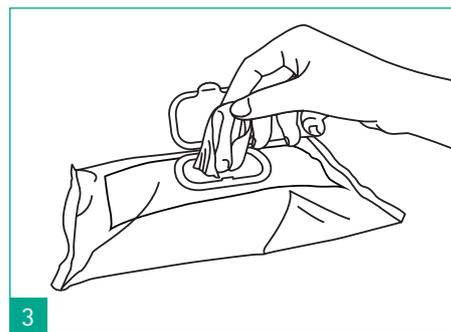


Use o Meliseptol® Wipes Sensitive para desinfetar o dispositivo.

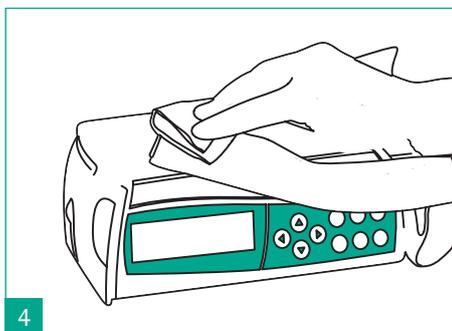


Em caso de contaminação visível, o procedimento deve ser realizado em duas etapas:

- Remova todos os resíduos visíveis antes da desinfecção usando Meliseptol® Wipes sensitive. Descarte de seguida o toalhete.
- Retire um novo toalhete e efetue a desinfecção normalmente. Descarte de seguida o toalhete.

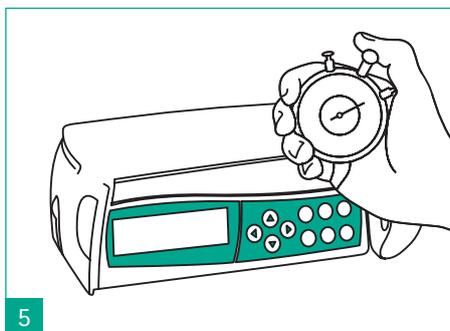

Desinfete a superfície visivelmente limpa garantindo que fica completamente húmida. Mantenha a superfície húmida durante o tempo de exposição indicado. Deixe as superfícies secarem completamente. Não seque a superfície com um toalhete.

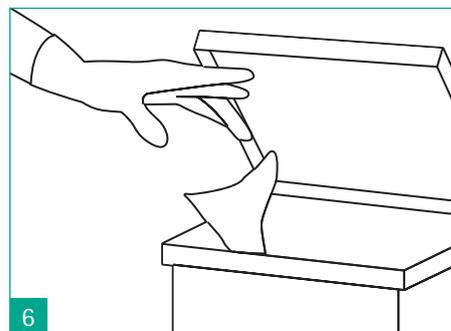

Retire as luvas. Em seguida, higienize as mãos com solução alcoólica ou lave com água e sabão.

\*Quando a bomba estiver em utilização, desinfete apenas a superfície superior e as laterais (pelo menos uma vez por dia).

A B. Braun apoia-o com conceitos e materiais de formação com o objetivo de manter o elevado desempenho na limpeza do ambiente. Além disso, a B. Braun oferece um completo portfólio de produtos de elevada qualidade, especialmente desenvolvidos para superfícies próximas ao doente e dispositivos médicos, que apresentam o melhor desempenho e compatibilidade com os materiais.



### Meliseptol® Wipes sensitive

EN 16615 (Teste de 4 campos) aprovada e 90 dias de utilização garantida.

B. Braun Medical, Unipessoal Lda | Est. Consiglieri Pedroso, 80 | Queluz de Baixo | 2730-053 Barcarena Tel. 214 368 242 | Fax 214 368 296 | www.bbraun.pt Contribuinte nº 501506543 | Cons. Registo Com. Cascais nº 501506543 | setembro 2022