



COMFORT CARE

LAVASURGE®

Prevenção de Infecção no Local Cirúrgico

Ambulatory Medical Center


Fevereiro 2023

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

O DESAFIO - INFEÇÕES DO LOCAL CIRÚRGICO....

As infeções do local cirúrgico (ILC) são uma das mais importantes infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS) e continuam a ser uma complicação após uma cirurgia.

Percentagem de infeções associadas aos cuidados de saúde por tipo de infeção, 2011-12¹

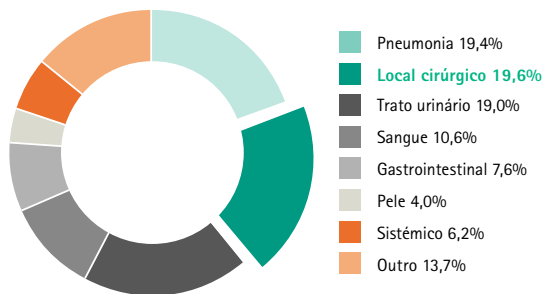

Cada infeção do local cirúrgico tem consequências económicas e humanas:


- A ILC pode duplicar o tempo de permanência de um doente no hospital²
- Custos adicionais atribuíveis à ILC
- Impacto negativo para o doente com enorme stress psicossocial

Na Europa a incidência de ILC é de 157 casos por 100.000 habitantes com uma estimativa de 800.000 casos por ano³ que geram custos estimados até 19 biliões EUR⁴ para o sistema de Saúde.

... E A RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS (RAM)

A resistência a antimicrobianos continua a aumentar e é uma das principais causas de morte.⁴ Alternativas para reduzir o uso de antibióticos devem ser consideradas.

O aumento contínuo da resistência até 2050 levaria à morte de 10 milhões de pessoas a cada ano e a uma redução de 2 a 3,5% no Produto Interno Bruto (PIB). Isso custaria ao mundo até 100 triliões de dólares.⁴

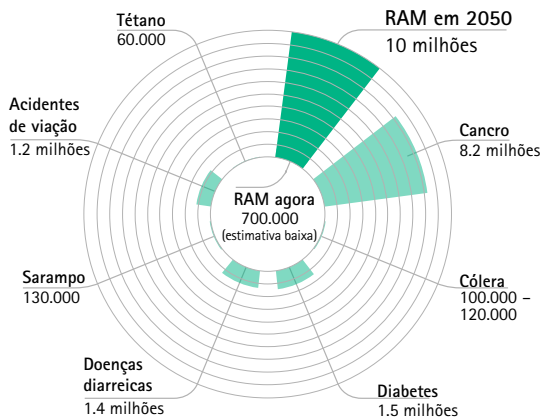

LavaSurge®

LavaSurge® pode ser utilizado como medida preventiva adjuvante para evitar as ILC. É um dispositivo médico líquido estéril, pronto a usar, e tem por base a solução de Ringer com 0,04% de Polihexanida como agente antimicrobiano para evitar o crescimento de microrganismos. Pode ser utilizado para irrigação cirúrgica, substituindo ou apoiando a utilização de soluções normais de ringer ou salinas.



APLICAÇÕES POSSÍVEIS

- Artroplastia total primária da anca e joelho
- Revisão de artroplastia da anca e joelho
- Artroplastia total do ombro
- Reconstrução mamária

LavaSurge® não pode ser utilizado:


- se o doente for alérgico a um dos excipientes do produto
- no SNC ou nas meninges
- no ouvido medio ou interno
- nos olhos
- na cartilagem hialina
- em combinação com tensoativos iónicos, sabonetes, pomadas, óleos, enzimas, etc.
- para lavagem ou enxaguamento peritoneal

INSTRUÇÕES DE MANUSEAMENTO

MANUAL



COM LAVAGEM PULSADA

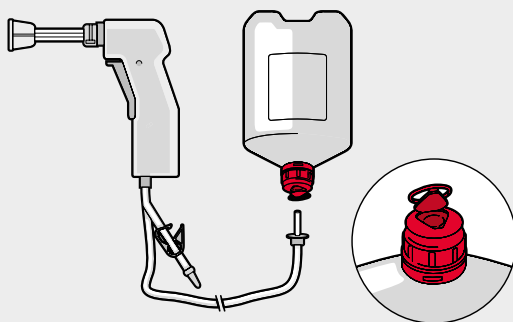

Comfort Care

Fevereiro 2023

Referência	Descrição	Unidade de Venda	Preço Unitário
19901	LAVASURGE 250ML	10	11,02 €
19902	LAVASURGE 1000ML	10	18,88 €

GAMA PRONTODERM®6

BANHO CORPORAL COMO PREVENÇÃO DO RISCO DE INFEÇÃO NO LOCAL CIRÚRGICO

- Inibição do crescimento, propagação e transmissão do MDRO
- Eficácia bactericida para MRSA, ESBL / ESCR e VRE
- Produtos *Leave-on*, efeito antimicrobiano por até 24 horas
- Excelente tolerância cutânea, dermatologicamente testada



1) WHO. Report on the burden of endemic Health Care-Associated Infection Worldwide. WHO. 2011 | 2) National Institute for Health and Clinical Excellence: Guidance. Surgical Site Infection: Prevention and Treatment of Surgical Site Infection. London: RCOG Press; 2008 Oct. | 3) Cassini A, Plachouras D, Eckmanns T, Abu Sin M, Blank H-P, Ducomble T, et al. (2016), Burden of Six Healthcare-Associated Infections on European Population Health: Estimating Incidence- Based Disability-Adjusted Life Years through a Population Prevalence-Based Modelling Study. PLoS Med 13(10): e1002150. doi:10.1371/journal.pmed.1002150 | 4) Source WHO, Global Guidelines for the prevention of surgical site infection | 5) AMR review. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations Chaired by Jim O'Neill. December 2014 | 6) IFU 87187-2013-11-13

Para mais informações contacte a Equipa da **B. Braun** através do email: clientes-ambulatorio.pt@bbraun.com

Esta campanha é válida até 28 de fevereiro de 2023 ou até final de stock, e salvo erro tipográfico. Obs.: IVA não incluído. Caso não pretenda receber este tipo de informação, agradecemos que informe a B. Braun através do email indicado.

B. Braun Medical, Unipessoal Lda | Ambulatory Medical Center
Est. Consiglieri Pedroso, 80 | Queluz de Baixo | 2730-053 Barcarena
Tel. 214 368 242 | Fax 214 368 296 | clientes-ambulatorio.pt@bbraun.com | www.bbbraun.pt
Contribuinte nº 501506543 | Cons. Registo Com. Cascais nº 501506543 | fevereiro 2023