

# Ally<sup>®</sup>, O seu parceiro do dia a dia!

Acessórios de Ostomia



# Acessórios de Ostomia

## Viva com segurança e conforto, viva Ally®!

Cada corpo é diferente. O mesmo acontece com cada estoma. A gama de acessórios Ally® foi desenvolvida para permitir um tratamento ainda mais personalizado do seu estoma. Em conjunto com os dispositivos de ostomia, os acessórios Ally® permitem manter a placa de ostomia no lugar adequado, para reduzir os problemas de fugas e para proteger e cuidar da pele circundante.

NOVA GAMA  
DE ACESSÓRIOS



0 %  
de gelatina  
animal

0 %  
de Látex

0 %  
DEHP /  
ftalatos

# Ally®

- 4 Ally® Anéis  
Anéis moldáveis de hidrocolóide para criação de uma barreira para o efluente 
- 6 Ally® Tiras de fixação  
Tiras adesivas e flexíveis para ostomias 
- 8 Ally® Pasta  
Pasta niveladora de barreira protetora da pele sem álcool 
- 10 Ally® Pó  
Pó absorvente de humidade para pele peri estoma 
- 12 Ally® Cinto  
Cinto para proporcionar sensação extra de segurança 
- 13 Ally® Removedor de Adesivos  
Remoção do dispositivo (placa) sem trauma cutâneo 
- 14 Ally® Barrier Film Spray Protetor  
Formação de uma barreira protetora da pele 
- 15 Superfiller pasta com álcool  
Pasta niveladora de barreira protetora da pele com álcool 

# Ally® Anéis



Anéis moldáveis de hidrocolóide para criação de uma barreira para o efluente

Os anéis Ally® são concebidos para criar uma superfície mais plana em redor do estoma, preenchendo as pregas ou desníveis cutâneos.

Destinam-se a evitar maceração, a resolver questões de fugas e a otimizar a selagem entre o estoma e a placa.

Os anéis Ally® podem ser usados por todas as pessoas com ostomia e são especialmente recomendados para pessoas que têm pregas ou depressões na pele em redor do estoma. Os anéis são adaptados para pessoas com baixa destreza.


Espessura	Diâmetro	Quantidade	Código de Material	C.N.P.
3 mm	48 mm	Caixa de 10 unidades	2022483	7132654

# Como usar ?




Assegure-se que a pele em redor do estoma se encontra limpa e seca.

Por favor, leia atentamente as instruções de utilização antes de utilizar o produto.

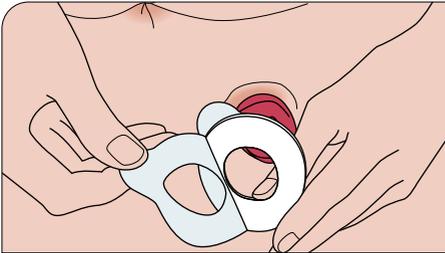


Remova o papel protetor.


Adaptado a baixa destreza:  
O papel protetor é fácil de remover pois contém abas.

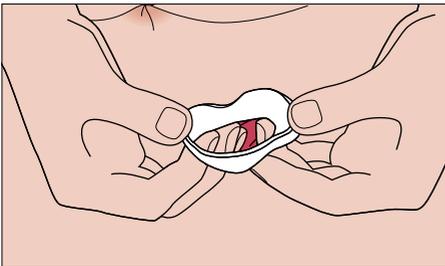

Molde o anel de ostomia pressionando e esticando gentilmente até adquirir o formato adequado ao seu corpo.

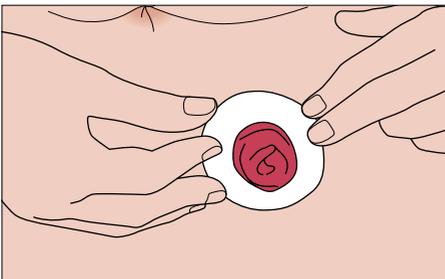

Posicione o anel à volta do estoma. Ajuste suavemente com os dedos molhados de forma a permitir a melhor adaptação e aderência à pele. Alise o bodo exterior do anel.

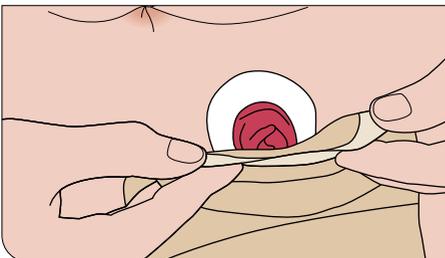

Coloque o saco de ostomia sobre o anel e alinhe o centro do saco com o centro do anel para garantir um ajuste adequado.

# Ally® Tiras de fixação

NOVO



## Tiras adesivas e flexíveis para ostomias

As tiras de fixação Ally® destinam-se a reforçar a área de aderência e manter a placa posicionada no seu lugar para prolongar o tempo de uso e reforçar a segurança do dispositivo.

As tiras foram concebidas para acompanhar os movimentos e os contornos do corpo.

As tiras de fixação Ally® são recomendadas para pessoas com hérnias peri estoma, estomas prolapsados, com um posicionamento difícil de colocar um dispositivo, depressões cutâneas ou proeminências ósseas.


Quantidade	Código de Material	C.N.P.
Caixa de 20 unidades	2022300	7133066

# Como usar ?




Assegure-se que a pele em redor do estoma se encontra limpa e seca.

Por favor, leia atentamente as instruções de utilização antes de utilizar o produto.

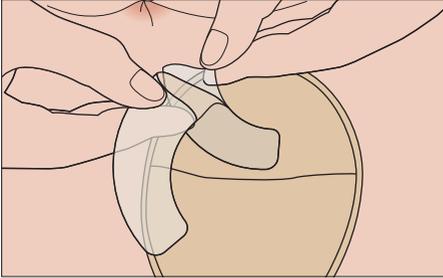

Remova metade do papel protetor.

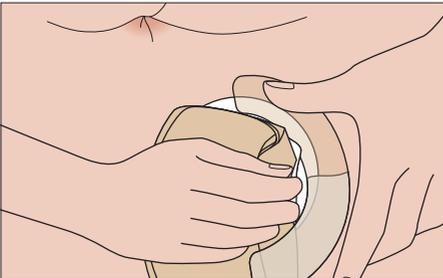

Aplique a tira de fixação na pele, sobrepondo-a à borda da placa. A tira de fixação deve-se sobrepor às bordas da placa em pelo menos 1,5 cm.



Remova o restante filme protetor e deslize a sua mão no sentido descendente para ajudar na aderência.

Proceda do mesmo modo no outro lado.

# Ally® Pasta



Pasta niveladora de barreira protetora da pele sem álcool

A Pasta Ally® é um nivelador e destina-se a preencher dobras e pregas na pele íntegra à volta do estoma. Foi concebida para reduzir o risco de fugas e proteger a pele de efluentes. Também ajuda a prolongar o tempo de uso dos dispositivos.

A Pasta Ally® é especialmente recomendada para pessoas que têm desníveis ou pregas na pele em redor do estoma.


Quantidade	Código de Material	C.N.P.
Tubo de 80 g	2022200	7133074

# Como usar ?




Assegure-se que a pele em redor do estoma se encontra limpa e seca.


Por favor, leia atentamente as instruções de utilização antes de utilizar o produto.

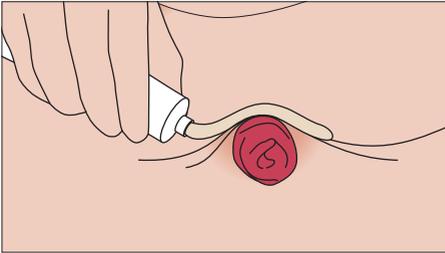


Aplique a pasta diretamente sobre a pele. Em alternativa, pode aplicar diretamente sobre a placa de ostomia. Não aplique a pasta em toda a área adesiva.

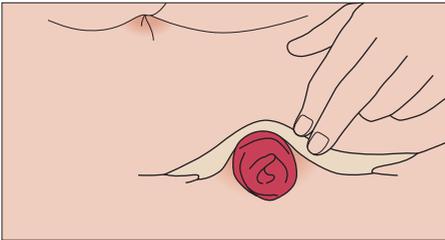

Se necessário, alise a pasta usando os dedos humedecidos, cotonetes ou tecido.

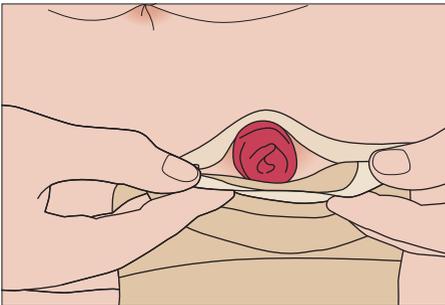

Após a aplicação da placa, garanta que o dispositivo está ajustado em torno do estoma pressionando ligeiramente a placa com os dedos. Retire a pasta residual no tubo com um tecido limpo. Após o uso tape o tubo para evitar o contato com humidade.

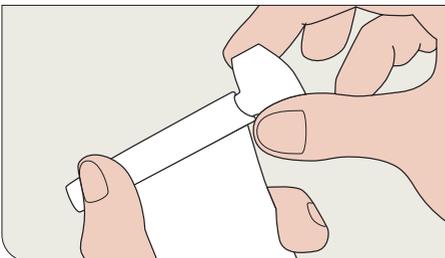

Use o utensílio que acompanha o tubo para esvaziar o tubo com maior facilidade.

# Ally® Pó



## Pó absorvente de humidade para pele peri estoma

O Pó Ally® foi concebido para absorver humidade em excesso na pele peri estoma, mantendo-a seca. Está indicado para tratar lesões de humidade e reduzir a maceração e permitir uma melhor aderência do dispositivo de ostomia. O pó promove a regeneração da pele.

O Pó Ally® é especialmente recomendado para pessoas com pele húmida, macerada ou ulcerada.

Quantidade	Código de Material	C.N.P.
Frasco de 28 g	2022100	7133082

# Como usar ?




Assegure-se que a pele em redor do estoma se encontra limpa e seca.

Por favor, leia atentamente as instruções de utilização antes de utilizar o produto.



Desenrosque a tampa, direcione a embalagem para a parte da pele irritada ou macerada e agite suavemente o frasco para aplicar uma quantidade de pó sobre a pele em torno do estoma.

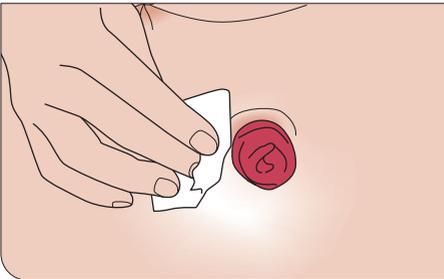

Espalhe o pó uniformemente com um lenço de papel. Retire o excesso de pó antes de aplicar a placa adesiva.

# Ally® Cinto



## Cinto para proporcionar sensação extra de segurança

O Cinto Ally® é um cinto sem látex, de fácil utilização e que proporciona uma sensação de segurança na utilização dos dispositivos de ostomia.

As dimensões do cinto são:

- Comprimento: 120 cm
- Largura: 4 cm
- Altura: 2,5 cm

O Cinto Ally® é utilizado para a compressão adicional dos dispositivos convexos de uma ou duas peças.

Quantidade	Código de Material	C.N.P.
1 cinto	5028L	7471003

# Ally® Removedor de Adesivos



## Remoção do dispositivo (placa) sem trauma cutâneo

O Removedor de adesivos Ally® não contém álcool, sem efeito de picada quando aplicado na pele e ajuda a preservar a integridade da pele.

Apresenta várias vantagens tais como:

- **Praticidade:** pode ser utilizado com o recipiente em qualquer posição e armazenado horizontalmente sem fugas;
- **Discrição:** o spray é silencioso ao usar;
- **Rentável:** Utilização sem desperdícios, uma vez que pode ser usado até que o recipiente esteja completamente vazio;
- **Benefícios ambientais:** utiliza um propulsor ecológico, nitrogénio, e é totalmente reciclável.

O Removedor de adesivos Ally® foi desenvolvido para remoção facilitada e indolor dos dispositivos de ostomia e todos os tipos de adesivos médicos colocados na superfície da pele.

Quantidade	Código de Material
Spray de 50ml	2005-1

# Ally® Barrier Film Spray Protetor

EM BREVE MARCA ALLY



## Formação de uma barreira protetora da pele

O Barrier Film Spray Protetor Ally® é um produto que não provoca ardor, de secagem rápida, desenvolvido para o cuidado da pele em estomaterapia e no tratamento de feridas.

O Barrier Film Spray Protetor Ally® apoia na prevenção de lesões na pele causadas pela fricção ou pelo exsudado e proteção da pele com risco de maceração e escoriações (área da peri ferida, pele peri estoma e zonas de fixação de cateteres e o dispositivos de drenagem). Além disso, ajuda na manutenção da integridade da pele neoformada protegendo-a desde o início da granulação.

Indicado para proteger a pele intacta ou danificada de fluidos corporais nas áreas de proteção da pele peri estoma, peri ferida e incontinência.

Quantidade	Código de Material	C.N.P.
Spray de 28ml	5036	7019893

# Superfiller Pasta com álcool

Pasta niveladora de barreira protetora da pele com álcool



A Pasta com álcool Superfiller é uma pasta niveladora, com álcool destina-se a preencher os desníveis e pregas cutâneas na pele peri estoma.

Foi concebida para reduzir o risco de fugas e proteger a pele de efluentes. Também ajuda a prolongar o tempo de uso dos dispositivos.

A Pasta com álcool Superfiller recomenda-se para pessoas que têm dobras ou pregas na pele em redor do estoma, em situações de colostomia, ileostomia, Urostomia e Fistulas.

Quantidade	Código de Material
Tubo de 60 g	F05008

Com quase 50 anos de desenvolvimento em cuidados de ostomia, apoiamos as pessoas com ostomia através da disponibilização de dispositivos e acessórios seguros e fáceis de utilizar, com uma oferta completa permitindo uma abordagem holística.



B. Braun Medical, Unipessoal Lda | Ostomia  
Est. Consiglieri Pedroso, 80 | Queluz de Baixo | 2730-053 Barcarena  
Tel. 214 368 200 | Fax 214 368 296 | [www.bbraun.pt](http://www.bbraun.pt)  
Contribuinte nº 501506543 | Cons. Registo Com. Cascais nº 501506543



[www.bbraun.pt/pt/doentes/ostomia.html](http://www.bbraun.pt/pt/doentes/ostomia.html)

These Class I medical devices are in accordance with MDR (EU) 2017/745 and CE self-certified on this basis.  
Read the instructions on the package insert and the label of each medical device carefully.

06-2024

CA-OF098DM0924