

Askina® Calgitrol® Paste

PASTA DE ALGINATO E IONES PLATA

Askina® Calgitrol® Paste es una pasta altamente conformable, compuesta por una matriz de alginato e iones plata, tecnología Calgitrol®, que proporciona una alta eficacia antimicrobiana.

Ha sido especialmente desarrollada para incrementar el contacto del agente antimicrobiano **Ag+** y el lecho de la herida, especialmente en aquellas que presentan cavidades y tunelizaciones.



Indicaciones

Heridas/úlceras infectadas. Uso externo:

- úlceras por presión
- úlceras vasculares
- úlceras neuropáticas
- quemaduras de segundo grado.

Aplicación de Askina® Calgitrol® Paste



- 1 Aplicar una capa de Askina® Calgitrol® Paste sobre toda la superficie de la úlcera
- 2 La adherencia del producto al lecho de la herida asegura su permanencia tras la aplicación
- 3 Cubrir con un apósito secundario adecuado

Compatible con vendajes de sujeción o compresivos



Mecanismo de acción:

El flujo de iones **Ag+** desde la matriz de alginato hacia la úlcera, se produce gracias a la acción del movimiento desde la pasta altamente concentrada (180 mg Ag+/envase 15 g) hacia el lecho de la herida por un intercambio iónico, consiguiendo una liberación sostenida a lo largo del tiempo de aplicación.

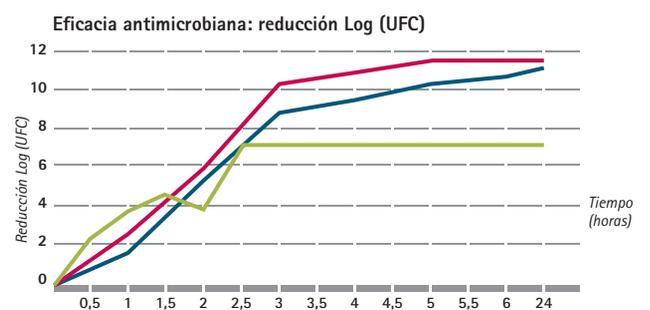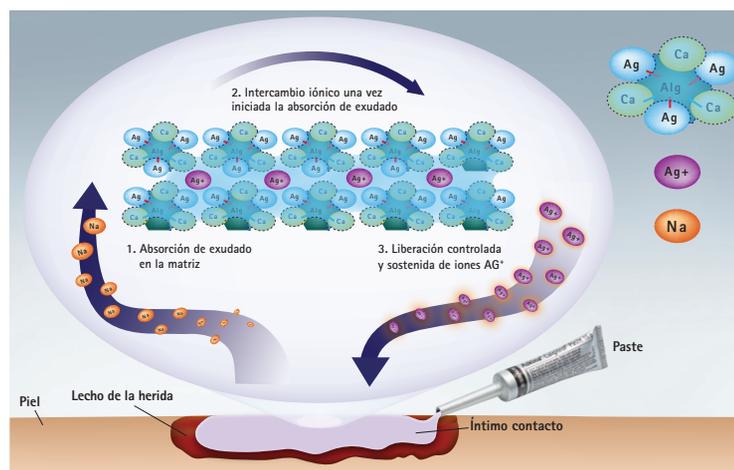

- *Escherichia coli* NCIMB 12416 – Reducción 9 Log en 3 horas
- *Pseudomonas aeruginosa* NCIMB 8626 0 – Reducción 10 Log en 3 horas
- Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA, ATCC BAA-44) – Reducción 7 Log en 3 horas

Código	Descripción	Medida	Unidades
6241505	Askina® Calgitrol® Paste	15 g	5